




Guide d'Utilisation

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (Sangle Sous-Axillaire) ou de taille (Sangle Dorsale) avec les cotes présentes sur les documentations.

Guide de Tailles

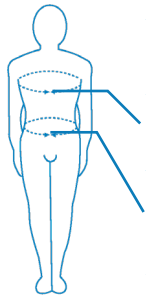


TAILLES	TU	S	M	L	XL
TOUR DE POITRINE	/	70/90	90/115	115/140	140/165
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	/	70/90	90/115	115/140	140/165

Compatibilités

	EASYLEV 5 (page 40)	EASYLEV 5 avec écartement (page 41)	WAYUP 5 (page 44)	WAYUP 5 avec écartement (page 45)	BLUE WAYUP (page 48)	BLUE WAYUP avec écartement (page 49)
SANGLE ÉCO (page 50)	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 51)	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
SANGLE DORSALE (page 51)	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

TU	A	107
	B	29

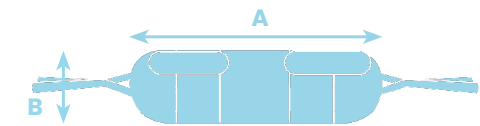

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Cette sangle est en taille unique.



Avant d'utiliser un releveur-moblie, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.

RÉFÉRENCE

SXPECO-PF-TU

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

75,00 €