

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**




**À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT  
DU BASSIN VERS L'AVANT  
ET MAINTENIR LE BUSTE  
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Boucle : 40 mm

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.

- Décliné en 3 tailles S, M, L
  - Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm)

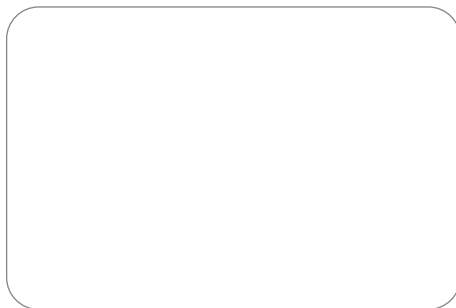

CBIM2HP-PF

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

# BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL


Composition  
Jersey polyester enduit de polyuréthane  
doublé de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

## NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

**Empêcher le Glissement du Bassin Vers l'Avant et Maintenir le Buste Droit**

- Positionner la partie pelvienne du body sur l'assise du fauteuil, la partie étroite de la pelvienne sur le dessus de l'assise du fauteuil, et côté dossier.
- Placer la sangle 1 autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Faire passer le body entre les jambes du patient, relever le body contre le buste et passer la tête entre les bretelles.
- Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
- Passer la sangle 2 derrière le dossier.
- Enfiler une des extrémités de la sangle dans la boucle formée à l'extrémité de la sangle 3.
- Fermer la boucle de fixation rapide de la sangle 2 et l'ajuster au plus prêt sans comprimer l'abdomen.
- Ajuster la longueur de la sangle 3 au plus court, pour éviter le basculement vers l'avant du patient en veillant à ne pas comprimer son thorax.

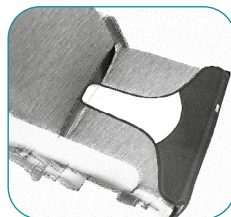

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**