

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## CEINTURE SLIM PELVIENNE

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**




**À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDICUÉ :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT  
DU BASSIN VERS L'AVANT**



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Hauteur de la ceinture et largeur  
partie pelvienne : + 11 cm  
Boucle : 50 mm

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
  - Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)
- Tour de taille (en cm)

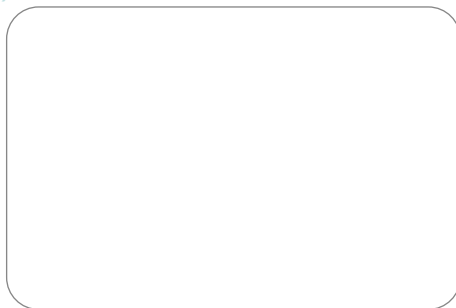

CSP2HP-PF

### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## CEINTURE SLIM PELVIENNE

### Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

### NOTICE D'UTILISATION

**à n'utiliser que pour l'usage indiqué :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT**

- Positionner la ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la sangle en dessous.
- Passer la boucle de la partie pelvienne entre l'assise et le dossier du fauteuil.
- Asseoir le patient sur le fauteuil et relever entre ses jambes la partie ceinture.
- Ajuster la ceinture autour de l'abdomen du patient.
- Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Fermer la boucle de la partie pelvienne et ajuster sa longueur (voir recto).

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**