

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## CEINTURE SLIM

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



**À N'UTILISER QUE POUR  
L'USAGE INDIQUÉ :**


**PRÉVENIR LES CHUTES**



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Hauteur de la ceinture : + 11 cm  
Boucle : 50 mm

Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

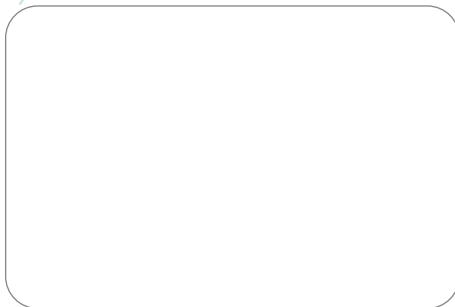

CCS2HP-PF

### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## CEINTURE SLIM

### Composition

Jersey polyester enduit  
de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

### NOTICE D'UTILISATION

#### à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LES CHUTES

- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- Fermer la boucle nylon puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**