



SANGLE DE TOILETTE



- Sangle sans têtère à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
- (*Confort = jambières en mousse)

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau étroit et n'a pas de mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES




CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



S	A	67
	B	26
	C	78
M	A	85
	B	26
	C	95
L	A	90
	B	26
	C	108
XL	A	100
	B	26
	C	122

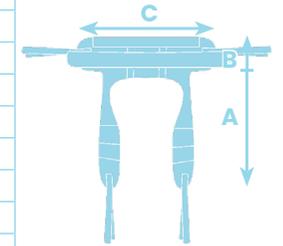

RÉFÉRENCES

STO-PF-S M L XL
(jersey confort)

TABAL-PF
(têtère amovible
et baleinée)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

155,00 €

45,00 €