


SANGLE SOUS-AXILLAIRE

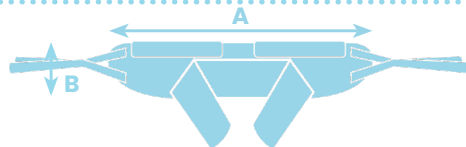

S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SAPVR-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €



SANGLE DORSALE



S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33

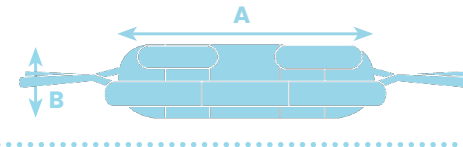

Sangle sous-fessière confort (SFC, en option)



Aide à la déambulation

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.

Ses sangles lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.

La sangle dorsale est également disponible en XXL (page 90).

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP3-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €	SFC-PF (sangle sous-fessière confort)	25,00 €