

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



SANGLE HAMAC ÉCO FILET



- Sangle sans têtère à attaches
- Sans jambières en mousse
- En Filet uniquement

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES




DÉCROISÉ



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TU	A	74
	B	121

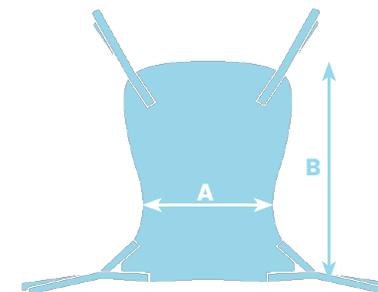

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
HA2-RBA-PF-TU (filet)	51,00 €
TAMOV-PF (têtère amovible)	35,00 €