

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

GILET INTÉGRAL

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :


**PRÉVENIR LA CYPHOSE
CERVICALE EN
MAINTENANT LE BUSTE
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 190 cm
Boucle : 40 mm

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégrafables.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 220 cm

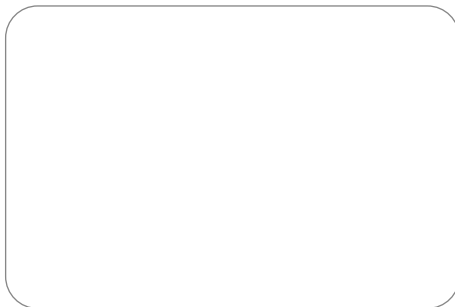

CGI3-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

GILET INTÉGRAL

Composition

Chaîne et trame en coton polyester

Filet polyester haute ténacité

Biais 100 % coton

Sangles 100 % polyester

Mousse PE 8 mm

Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LA CYPHOSE CERVICALE EN MAINTENANT LE BUSTE DROIT

- Ouvrir les boucles d'épaule.
- Mettre en place le gilet intégral.
- Refermer les boucles d'épaule.
- Croiser les pans du devant du gilet.
- Faire passer la sangle de ceinture dans la fente prévue à cet effet.
- Ceinturer le dossier du fauteuil en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Passer l'extrémité de la sangle libre dans le passant arrière.
- Refermer la boucle 40 mm.
- Ajuster la longueur de la sangle à l'aide de la boucle nylon (25 mm) pour éviter le basculement vers l'avant, du tronc de la personne.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ