

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

MAINTIEN DE BUSTE

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :


**PRÉVENIR LA CYPHOSE
CERVICALE EN
MAINTENANT LE BUSTE
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 190 cm
Boucle : 40 mm

Il procure un confort renforcé du buste.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 190 cm

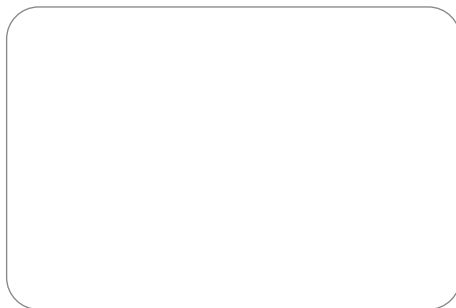

CMB2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

MAINTIEN DE BUSTE

Composition
Jersey polyester enduit de
polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LA CYPHOSE CERVICALE EN MAINTENANT LE BUSTE DROIT

- Enfiler le maintien de buste par la tête. Faire passer la sangle de la ceinture au travers du passant, situé à l'extrémité des bretelles de la veste, en ceinturant le dossier du fauteuil. Ajuster les longueurs des sangles en fonction des besoins.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ