

**Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE

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


Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV-PF).



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



SST-PF / SML-PF / SSTBA-PF / SMLBA-P

v 03.03/2020


Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	SST	SML
S	A	59
	B	62
	C	60
M	A	67
	B	68
	C	64
L	A	65
	B	78
	C	71
XL	A	70
	B	72
	C	90

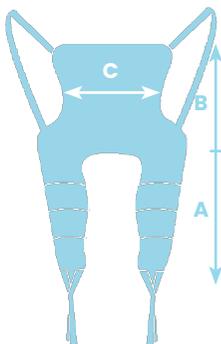

Compositions Modèles : Jersey/Jersey Confort
Jersey 100 % polyester
Mousse PE 150 kg/m³ (Modèle confort)
Sangles 100 % polyester

Composition Modèles : Filet / Filet Confort
Filet 100 % polyester
Mousse PE 150 kg/m³ (Modèle confort)
Sangles 100 % polyester

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Le dossieret de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-malade en quatre points :

- 2 de part et d'autre du dossieret,
- 1 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossieret au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossieret et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personnes.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles. Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

INSTALLATION DE LA TÊTIÈRE (OPTION)

La têtière amovible TAMOV-PF est disponible en option sur les modèles de sangles de toilette éco, l'installation de celle-ci se fait comme suit :

TAMOV-PF : La têtière amovible se glisse entre la sangle et le patient, elle permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple..

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ