

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

## RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

## POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE  
LES JAMBES



CROISÉ SOUS  
LES JAMBES

## TÊTIÈRE (OPTION)


L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



# SANGLE DE TOILETTE ÉCO



- Sangle sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey uniquement

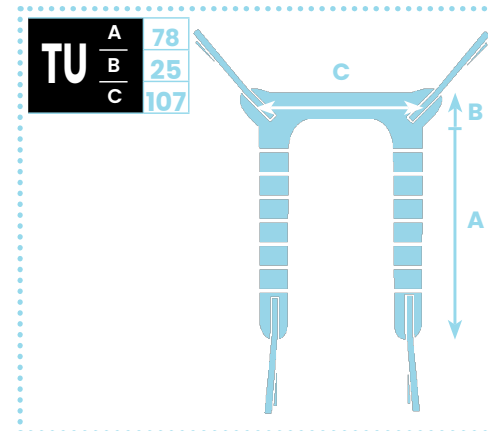

### RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.  
(TVA 5,5%)

STORP2-PF-TU  
(jersey)

85,00 €

TABAL-PF  
(tête amovible  
et baleinée)

45,00 €