

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

PLASTRON ÉCO MODULABLE

POUR TOUS FAUTEUILS




**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 228 cm

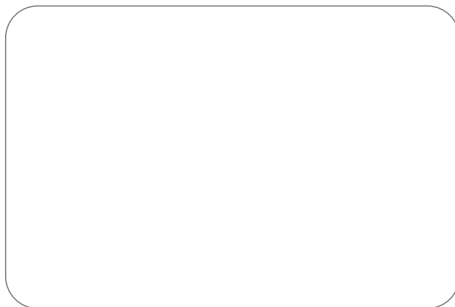

CECO2-PF-B

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

PLASTRON ÉCO MODULABLE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

Le Plastron ECO Modulable se décline sous 2 variantes modulables :

1 - la Ceinture ECO de Buste (CECO-B) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste.

a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.

b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.

c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

2 - la Ceinture ECO Intégrale (CECO-I) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien.

a - Pour la mise en place de la ceinture ECO Intégrale, procéder d'abord comme pour la ceinture ECO Pelvienne (2) puis comme le paragraphe d et e de la ceinture ECO de Buste (3).



Modèle CECO + Module de Buste



Modèle CECO + Module de Buste
+ Module pelvien

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ