


SANGLES HAMAC



- Sangles avec ou sans tête
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, en Filet ou en Filet Confort* (*Confort = jambières en mousse)



S	A	62
	B	96
M	A	66
	B	104
L	A	74
	B	113
XL	A	83
	B	121

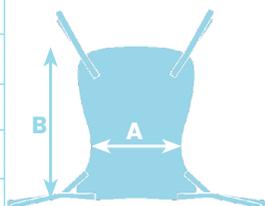

Leurs coupes simples et échancrées sur les côtés font d'elles des sangles à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort (SHAC2) et Filet Confort (SHAC2BA) réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-allongée nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire sur un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



TRANSFERTS

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SHA2BA-PF- S M L XL (filet)	90,00 €
SHA2-PF- S M L XL (jersey)	90,00 €	SHAC2BA-PF- S M L XL (filet confort)	90,00 €
SHAC2-PF- S M L XL (jersey confort)	90,00 €	TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
		TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €