## NAUSICAA Médical

## **Procédure VS-07:**

## Changement de l'afficheur batterie VS-BCAM

## Pièces détachées :

\*VS-BCAM : Cartouche amovible de batterie avec affichage de et équilibrage de charge.

\*VS-BCAM-KCRT: KIT DE CONNEXION AVEC FUSIBLE pour cartouche batterie VS-BCAM.

Positionner le bloc batterie à l'envers sur la mousse puis dévisser les 7 vis, retournez ensuite le bloc.







Ouvrir le boitier sur le côté en faisant attention à ne pas casser les branchements.

ETAPE N°2



Puis débrancher le COS entouré en rouge.



Sur la partie haute du bloc, dévisser les deux vis qui maintiennent la carte puis la remplacer par la nouvelle carte.

ETAPE N°3





Sur la partie batterie, sortir les deux batteries comme indiqué dans les images ci-après :

ETAPE N°4






V01.10/13 Page **1** sur **2** 

Débrancher la carte puis dévisser les deux vis qui maintiennent la carte pour enfin la remplacer par la nouvelle carte.



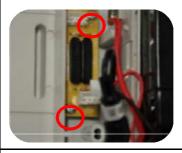



Remettez en place les batteries. Attention : vérifiez que le COS entouré en rouge est toujours bien branché :


ETAPE N°6





Rebranchez la partie haute du bloc batterie.

ETAPE N°7

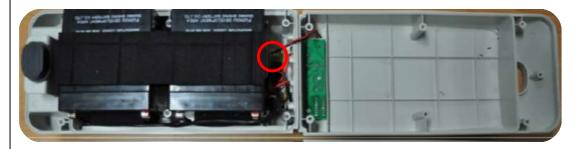

Avant de refermer le bloc, vérifier que le ressort est bien en place comme indiqué sur l'image ci-après :



Refermez le bloc puis visser les 7 vis :







V01.10/13 Page 2 sur 2